

ENZYMEX L9



DETERGENTE DESINFECTANTE ENZIMÁTICO
PARA EL LAVADO MANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS



■ DOMINIO DE APLICACIÓN

- Quirófano, endoscopia, oftalmología y contactología

■ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Activo contra los virus envueltos incluso *Coronavirus*
- Complejo tri-enzimático (lipasa, amilasa y proteasa) combinado a unos potentes tensoactivos
- No contiene biguanida
- Integridad del instrumental garantizada durante 72h de inmersión
- Se puede utilizar en lavadoras ultrasónicas
- Franklab tiene las certificaciones ISO 9001 e ISO 13485



ENZYMEX L9

DETERGENTE DESINFECTANTE ENZIMÁTICO PARA EL LAVADO MANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

■ INSTRUCCIONES DE USO

■ Preparación de la solución :

- Usar guantes, lentes y delantal
- Diluir 25 ml de ENZYMEX L9 para 5 litros de agua de la llave (20°C) y homogeneizar la solución

■ Utilización:

- 1- Sumergir totalmente los dispositivos médicos sucios en la solución.
- 2- Cepillar los dispositivos médicos, y pasar el hisopo si es necesario
- 3- Tiempo de contacto : 10 minutos
- 4- Enjuagar abundantemente

■ PROPIEDADES DESINFECTANTES

Actividades	Normas	Concentración	Tiempo de contacto
Bactericida	EN 13727	0,5%	5 minutos
	EN 14561	0,5%	10 minutos
Levuricida	EN 13624	0,5%	5 minutos
	EN 14562	0,5%	10 minutos
Virucida	EN 14476 (Virus PRV modèle de l'hépatite B)	0,5%	5 minutos
	EN 14476 + A2 (Herpès Virus)	0,5%	5 minutos
	EN 14476 + A1 (Virus DBV modèle de l'hépatite C, Virus HIV)	0,5%	10 minutos
	EN 17111 (Vaccinia Virus)	0,5%	10 minutos

■ PRECAUCIONES DE USO

Referirse a la Ficha de Seguridad (FS 010435)

■ CARACTERÍSTICAS

- Aspecto : Líquido
- Color : Verde
- pH puro : 8.3
- pH a 0,5% : 7.5
- Caducidad : 2 años

■ COMPONENTES

- Agentes tensoactivos no iónicos
- Amonio cuaternario de 5^{ta} generación
- Enzimas : lipasa, amilasa y proteasa
- Agentes secuestrantes

■ PRESENTACIÓN

- 1 Caja de 250 dosis de 25 mlref. **1043547**
- 2 Caja de 12 bidones de 1 Lref. **1043516**
- 3 Caja de 4 bidones de 5 Lref. **1043520**



Producto peligroso - respetar las precauciones de uso. Leer la etiqueta y la información relativa al producto antes de usar. Dispositivo médico de Clase IIB.